



DETAX
| a u d i o |

DETAX audio 2014

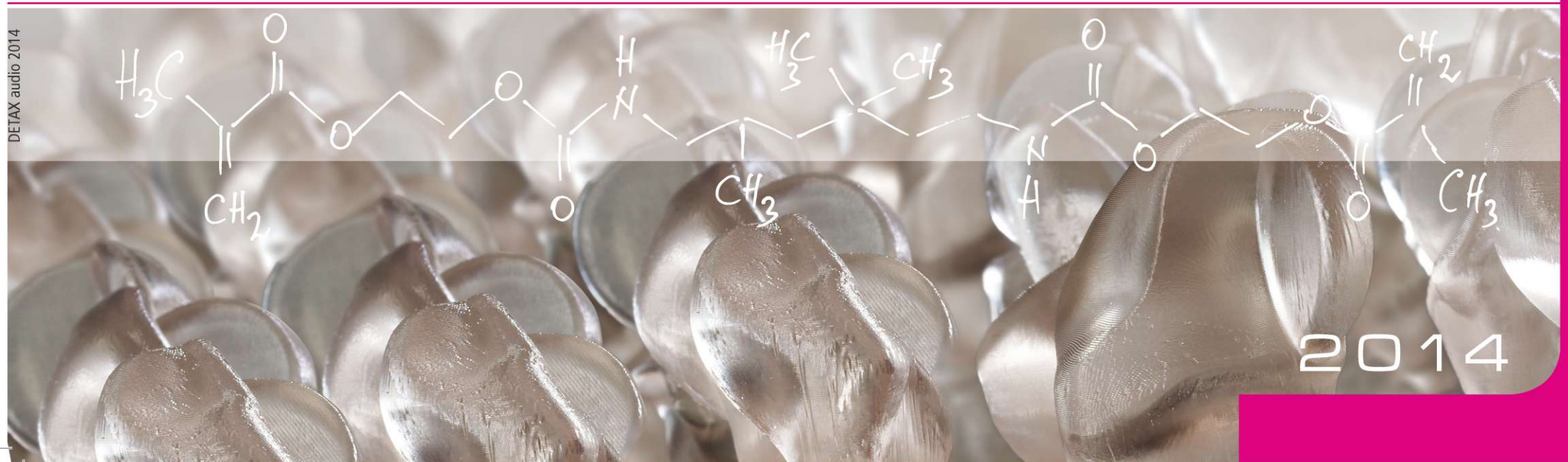

2014

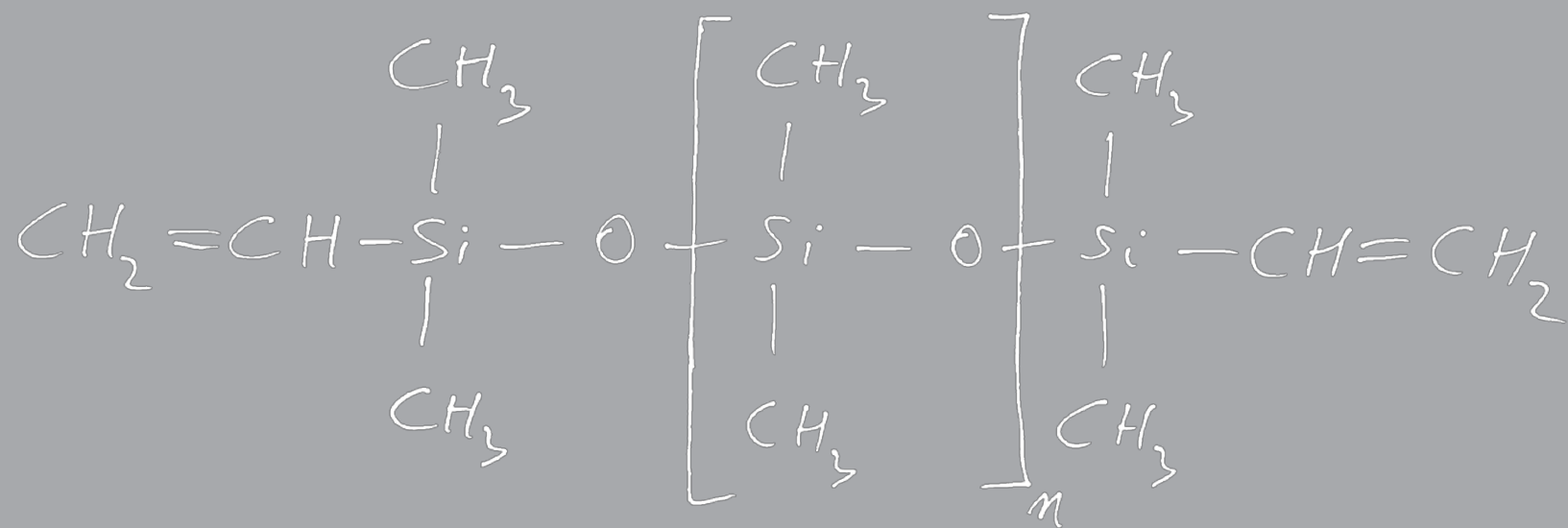

Полімери всіх форм і кольорів увійшли в наше повсякденне життя з тих пір, як хімік Герман Штаутінгер приблизно в 1920 році вперше створив синтетичний матеріал. Чи йде мова про пакет з поліетиленової плівки або про корпус слухового апарату, молекулярна будова залишається принципово однаковою. Протягом 60-ти років ми розробляємо **силікони і синтетичні матеріали світлового затвердіння** для використання в стоматологічних та інших медичних цілях. Полімерна хімія і дослідження матеріалів - головна сфера нашої роботи, наша спеціалізація і компетенція. Можливості застосування наших матеріалів практично безмежні, завдяки їх унікальним у своєму роді фізичним властивостям. Наприклад, силікон - особливо **міцне сполучення полімерів** і універсальний матеріал. Силікон має тривалий строк служби, є особливо еластичним, стійким до вологості і біологічно сумісним. Крім того, він стійкий до високих температур, легко піддається очищенню і стерилізації - чудовий матеріал для всебічного застосування в медичних технологіях. Універсальність полімерів і можливість цілеспрямовано створювати бажані властивості матеріалів дозволяють оптимально пристосовуватися до різних біомедичних вимог. Таким чином, detax softwear® - перший силікон для вушних вкладишів для заповнення негативних форм, виготовлених генеративним методом - був спеціально розроблений для цієї мети. Завдяки новим властивостям - чудова текучість, витіснення повітря і мінімальне поверхнєве тертя - такі явища, як поява бульбашок при заливанні форм і зчеплення з полімерним матеріалом, залишилися в минулому. Наш ентузіазм та інноваційні ідеї знайшли відображення в кожному продукті, з якими Ви ознайомитеся на наступних сторінках. Всі вони входять до числа найкращих матеріалів, представлених на ринку. Як компанія середньої величини в хімічній промисловості, ми надаємо великого значення високому рівню спеціалізації, збільшенню обсягів інвестицій у розвиток продукції і висококваліфікованих співробітників. Починаючи від розробки продукту, його виробництва, упаковки, менеджменту та якості продукції, аж до збуту - ми повністю контролюємо всі виробничі процеси. Основою цих ділових відносин є компетенція, довіра і повага.

Все інше - це хімія!

DETAX GmbH & Co. KG
Еттлінген/Німеччина

6 - 7

Комунікація & Сервіс

9

Таблиця характеристик - силікони для виготовлення зліпків в картриджах

13

Таблиця характеристик – маси для виготовлення зліпків

18

Таблиця характеристик – силікони для вушних вкладишів

24

Таблиця характеристик – силіконові лаки

8 - 47

Продукція

48

Алфавітний покажчик

Силікони для
виготовлення зліпків

8

Силікони для
вушних вкладишів

17

Силіконові лаки

23

Дублюючі силікони

28

Полімерні матеріали для
вушних вкладишів


30

Гігієнічна
продукція

35

Супутні товари

39

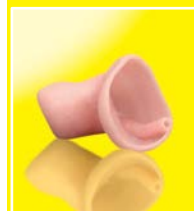

Сервіс клієнтів Технічна підтримка

Ви маєте питання щодо нашої продукції, умов поставки або інше прохання? Наша служба сервісу клієнтів у Вашому розпорядженні з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 17:00 години.

У Вас виникли технічні питання щодо нашої продукції, її застосування або хімічного складу? Наші технічні фахівці охоче проконсультують Вас.

Додаткову інформацію про продукцію, практичні посібники з використання продукції, інформацію про заплановані заходи компанії в країні і за кордоном, дані консультантів, актуальні теми і багато іншого Ви знайдете на інтернет-сайті: www.detax.de.

Вам потрібні дані про дослідження, аналізи, професійна інформація, формуляри з даними про безпеку продукції, декларація про відповідність або інструкції з використання? Ми приготуємо для Вас повну документацію і охоче надамо Вам необхідні дані.

Сервіс клієнтів

service@detax.de

Тел +49 7243 - 510-103

Тел +49 7243 - 510-104

Факс +49 7243 - 510-100

Відділ експорту

export@detax.de

Тел +49 7243 - 510-102

Тел +49 7243 - 510-105

Тел +49 7243 - 510-211

Факс +49 7243 - 510-100

Відділ по роботі з міжнародними партнерами

Тел +49 7243 - 510-147

Факс +49 7243 - 510-100

Технічна підтримка

support@detax.de

Тел +49 7243 - 510-0

Тел +49 7243 - 510-201

Факс +49 7243 - 510-100

Документація

documentation@detax.de

Тел +49 7243 - 510-147

Факс +49 7243 - 510-100

Застосування продукції

application@detax.de

Тел +49 7243 - 510-226

Факс +49 7243 - 510-100



Сертифікація & Вимоги

Сертифікація відповідно до діючих норматив (вперше в 1996 році) і директив для медичної продукції. Сертифікація відповідно до додатку II , директиви 93/42/EEC , EN ISO 13485: 2003 (+ AC:2009), стандартів якості DIN EN ISO 13485:2003 (+ AC:2009), також для Канади і Тайвані, а також відповідно до постанови 169 для Японії, ДЕСТ Р для Росії, ДЕСТ Б для Білорусії. З лютого 2012 року компанія зареєстрована в Європейському Банку Даних (RAKCD) як відомий вантажовідправник. Усі виробничі процеси регулюються інтегрованою системою менеджменту техніки безпеки. Відділ нормативно-законодавчих актів з радістю проконсультує Вас з усіх питань, пов'язаних з міжнародними стандартами сертифікації та конкретними регіональними вимогами.





Силікони для ВИГOTOВЛЕННЯ ЗЛІПКІВ

addition ultra®	10
addition supra®	10
addition spectra	11
addition protect XPress	11
addition mini Junior	12
pink putty	14
detax addition	14
green eco	15
detax flextime®	15
classic futur	16
cat futur	16



Таблиця характеристик

Картриджі

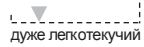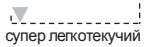	Тип	Консистенція	В'язкість/Текучість		Тиксотропія		Характеристики затвердіння	Тривалість знаходження у вусі/тривалість загалом	Кінцева твердість	Сканування	Особливості	Супутні товари
			низька	висока	низька	висока						
addition ultra®		lite					Звичайне затвердіння	3:00/3:30	37 за Шором А	★★★★	Універсальний, преміум клас	Пістолет-дозатор, змішувальні канюлі, отоблоки, otopen, dip coat, express coat, Abdrucklack
addition supra®		Xlite					Звичайне затвердіння	3:00/3:30	35 за Шором А	★★★	Для вузького слухового каналу внутрішньоканальний (ІТЕ) / внутрішньоканальний (CIC), дитячий	Пістолет-дозатор, змішувальні канюлі, отоблоки, otopen, dip coat, express coat, Abdrucklack
addition spectra		lite					Швидке затвердіння	2:30/3:00	39 за Шором А	★★★	Універсальний внутрішньоканальний (ІТЕ) внутрішньоканальний (CIC), легко видавлюється, кремова текстура	Пістолет-дозатор, змішувальні канюлі, отоблоки, otopen, dip coat, express coat, Abdrucklack
addition protect		lite					Супер швидке затвердіння	1:55/2:25	38 за Шором А	★★★★	Шумоізолюючий, гарне прилягання, швидке затвердіння	Пістолет-дозатор, змішувальні канюлі, Intra Tips, отоблоки, otopen, dip coat, express coat, Abdrucklack
addition mini Junior		XXlite					Супер швидке затвердіння	2:00/2:30	25 за Шором А	★★★	Для дітей і підлітків, для вузького слухового каналу, в картриджах minimix	Пістолет-дозатор minimix, насадки mini, вентилявані отоблоки, otopen, dip coat, express coat, Abdrucklack
detax flextime®		medium					Затвердіння „snap set“	2:30/3:00	35 за Шором А	★★★	Терморегульований, яскраві кольори, ефект затвердіння "snap set"	Пістолет-дозатор, змішувальні канюлі, отоблоки, otopen, dip coat, express coat, Abdrucklack

addition ultra®

Універсальний зліпочний матеріал, преміум класу, м'яка початкова консистенція, тиксотропний, не витікає з вуха. Чудове відтворення деталей, стійкий до розриву, відмінна еластичність. Тривала стійкість форми, добре сканований, легко обробляється, не викликає подразнення шкіри, біологічна сумісність. А-силікон, середня в'язкість, час знаходження у вусі: 3 хв., кінцева твердість: 37 за Шором А, колір: світло-блакитний.



Арт.	Форма випуску	Од.
02082	Картриджі, Automix1 основа + каталізатор	8 x 50 мл
03187	Змішувальні канюлі optima, білі	50 шт
02523	8 картриджів Automix2 основа + каталізатор	8 x 50 мл
02770	Змішувальні канюлі, рожеві	25 шт

addition supra®

Зліпочний матеріал, спеціально розроблений для виготовлення внутрішньоканальних слухових апаратів (CIC) і для застосування в дуже вузьких слухових каналах, наприклад, у дітей або пацієнтів з низьким больовим порогом. Легкотекуча початкова консистенція, тиксотропний. Легко виймається, висока еластичність, високий опір розриву, тривала стійкість форми, біологічна сумісність. А-силікон, низька в'язкість, час знаходження в вусі: 3 хв., кінцева твердість: 35 за Шором А, колір: яскраво-рожевий.



Арт.	Форма випуску	Од.
02305	Картриджі, Automix1 основа + каталізатор	8 x 50 мл
02345	Насадки Intra Tips для Automix1	96 шт
02769	Картриджі Automix2 основа + каталізатор	4 x 50 мл
	Змішувальні канюлі, рожеві	7 шт
02771	Насадки Intra Tips для Automix2	25 шт

addition spectra

Зліпочний матеріал високої точності, легка, кремopodobна консистенція. Виготовлення зліпка не вимагає зусиль, висока точність відтворення деталей. Нові властивості текучості, легке видавлювання з пістолета-дозатора, не витікає з вуха. Легко виймається і обробляється. Не викликає подразнення, біологічно сумісний. А-силікон, низька в'язкість, час знаходження у вусі: 2 хв. 30 сек., кінцева твердість: 39 за Шором А, колір: бузковий.



Арт.	Форма випуску	Од.
03202	Бюджетна упаковка Automix1 основа + каталізатор Змішувальні канюлі, бузкові	8 x 50 мл 32 шт
03203	Картриджі Automix1 основа + каталізатор	8 x 50 мл
03159	Змішувальні канюлі, бузкові	50 шт
03282	8 картриджів Automix2 основа + каталізатор	8 x 50 мл

addition protect XPress


Зліпочний силікон, спеціально призначений для виготовлення шумоізоляційних беруш. Швидкий і ефективний, ідеально підходить для виготовлення зліпків. Висока точність, відмінне співвідношення ціна-якість. Швидке затвердіння і мінімальні фізичні зусилля видавлювання з пістолета-дозатора. Кремopodobна початкова консистенція, чудова текучість, не витікає з вуха. Максимальна еластичність (99,8%), опір розриву, тривала стійкість форми. Легко виймається і обробляється. А-силікон, низька в'язкість, час знаходження у вусі: всього 1 хв. 55сек.!, кінцева твердість: 38 за Шором А, колір: бірюзовий.



Арт.	Форма випуску	Од.
03442	8 картриджів Automix2 основа + каталізатор	8 x 50 мл
03443	50 картриджів Automix2 основа + каталізатор	50 x 50 мл
02770	Змішувальні канюлі, рожеві	25 шт
02969	Змішувальні канюлі, рожеві	100 шт


addition mini Junior

Високоточний силікон для виготовлення зліпків для дітей і підлітків (також підходить для вузьких слухових каналів). Нова кремоподібна консистенція, низької в'язкості. Не створює тиску, без зміщення м'яких тканин. При високій тиксотропії матеріал володіє тривалою стійкістю форми, без небажаних витоків! Не липне і легко виймається. Високий опір розриву і пружне відновлення при деформації (99,8%). Не викликає подразнення, біологічно сумісний. Зручний для дітей: коротка тривалість знаходження у вусі (2 хв.)! Випускається у формі зручних і легких у використанні мінікартриджів. А-силікон, низька в'язкість, кінцева твердість: 25 за Шором А, колір: жовтий, лимонний аромат!

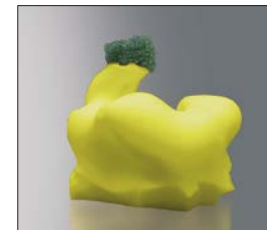


Арт.	Форма випуску	Ед.
03439	Стандартний набір основа + каталізатор, minimix Змішувальні канюлі minimix, зелені Поршень, багаторазового використання	4 x 10 мл 8 шт 1 шт
03440	Набір поновлення основа + каталізатор, minimix Поршень, багаторазового використання	8 x 10 мл 1 шт
03446	Змішувальні канюлі minimix зелені	25 шт
03448	Гнучка трубка для канюлей minimix	20 см
03447	Пістолет-дозатор mini	1 шт
03449	Вентильовані отоблоки Ø 7 мм	24 шт

addition mini – відео!

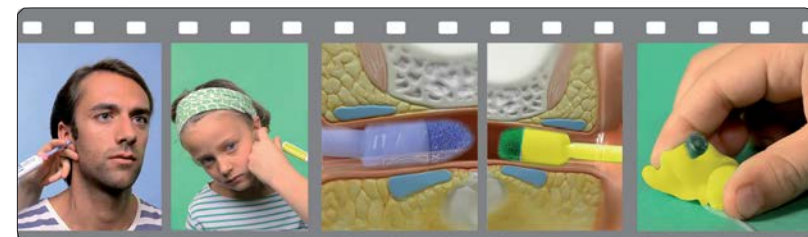

www.detax.de/addition-mini/clip-en

Таблиця характеристик

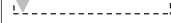		Тип	Консистенція	В'язкість/Текучість		Стиснення	Тривалість обробки	Тривалість знаходження у вусі	Кінцева твердість	Сканування	Особливості	Супутні товари	
			низька	висока	низька	висока							
А-силікони	pink putty		medium			В'язкість Текучість	0,15 %	1:30	2:30	35 за Шором А	★★★	М'яка початкова консистенція, економічний, універсальний	Блок для змішування, шприц easy, dip coat, express coat, Abdrucklack, otopen
	detax addition		supersoft			В'язкість Текучість	0,13 %	2:00	2:30	30 за Шором А	★★★★★	Супер м'яка консистенція, вища якість, максимальна деталізація	Блок для змішування, шприц easy, dip coat, express coat, Abdrucklack, otopen
	green eco		medium			В'язкість Текучість	0,14 %	2:00	3:00	40 за Шором А	★★★★★	Жовтий/ зелений, аромат лимона, ефект "snap set"	Блок для змішування, шприц easy, dip coat, express coat, Abdrucklack, otopen
	detax flextime®		soft			В'язкість Текучість	0,14 %	2:00	2:00	30 за Шором А	★★★	Терморегульований, яскраві кольори	Блок для змішування, шприц easy, dip coat, express coat, Abdrucklack, otopen
С-силікон	detax classic		medium			В'язкість Текучість	0,5 %	1:30	4:30	25 за Шором А	★★★	С-силікон, м'яка консистенція, інертна система	Блок для змішування, шприц easy, dip coat, express coat, Abdrucklack, otopen

pink putty

Універсальний силікон для виготовлення зліпків, м'яка кремова початкова структура, легко змішується і виймається. Швидко твердіє. Чудове співвідношення ціна-якість, високе відтворення деталей і опір розриву, збереження форми та об'єму; НЕ викликає подразнення шкіри, біологічна сумісність. А-силікон, колір: рожевий, кінцева твердість: приблизно 35 за Шором А.



Арт.	Форма випуску	Од.
03522	Одноразовий набір основа + каталізатор	10 x 2 x 8 г
03510	Стандартний набір основа + каталізатор Мірні ложечки біла/рожева	2 x 500 мл 2 шт
03511	Еко набір основа + каталізатор Мірні ложечки біла/рожева	2 x 1000 мл 2 шт
02198	Зліпочний шприц easy білий	1 шт
03503	Зліпочний шприц easy2 довгий, рожевий	1 шт

detax addition

Дуже м'який силікон для виготовлення зліпків вищої якості, з м'якою початковою консистенцією, чудове відтворення деталей, тривала стійкість форми, висока точність зліпків, легко виймається. А-силікон, кінцева твердість: 30 за Шором А, колір: світло-синій.



Арт.	Форма випуску	Од.
02381	Стандартний набір основа + каталізатор Мірні ложечки синя/біла	2 x 250 мл 2 шт
02717	Великий набір (2 x 800 г) основа + каталізатор Мірні ложечки синя/біла	2 x 670 мл 2 шт
02271	Меган набір основа + каталізатор Мірні ложечки синя/біла	2 x 5000 мл 2 шт

green eco

Зліпочний матеріал середньої в'язкості, що створює слабкий тиск. Висока еластичність відновлення за рахунок інноваційних полімерів, надзвичайний опір розриву, тривала стабільність форми та об'єму. Ефект «snap set» (контрольована динаміка вулканізації у вусі). А-силікон, кінцева твердість: 40 за Шором А, колір: зелений лайм, аромат: лимон.



Арт.	Форма випуску	Од.
02487	Стандартний набір основа + каталізатор мірні ложечки зелена/жовта	2 x 800 г 2 шт
02703	Оптовий набір основа + каталізатор	2 x 25 кг

detax flextime®

Зліпочний матеріал, інноваційна м'яка консистенція, володіє термочутливими характеристиками затвердіння, тривалість знаходження у вусі: макс. 2 хв. 30 сек., тривала стійкість форми. Відливання без утворення бульбашок, відразу після виготовлення зліпка. Аромат: лісові ягоди (основа), А-силікон, колір: фіолетовий, кінцева твердість: 30 за Шором А, картридж кінцевої твердості: 35 за Шором А.



Арт.	Форма випуску	Од.
02300	Стандартний набір основа + каталізатор мірні ложечки фіолетова/рожева	2 x 250 мл 2 шт
02330	Набір картриджів Automix1 основа + каталізатор	8 x 50 мл

classic futur

Матеріал для виготовлення зліпка конденсаційного затвердіння, м'який, липка початкова консистенція, що створює слабкий тиск, чудове відтворення деталей, низька усадка. Легко виймається, високий опір розриву і розтягуванню. Пропонується в наборі для повторного заповнення. С-силікон, колір: фіолетовий*, кінцева твердість: 25 за Шором А, аромат: лимон.



Арт.	Форма випуску	Од.
02380	Стандартний набір	
	Бочонок з основою	500 мл
	Біла мірна ложечка	1 шт
	Тюбик каталізатора	23 мл
02644	Набір поновлення	
	Пакет з основою	500 мл
02093	Оптовий набір	
	Контейнер з основою	25 кг
	і тюбик с каталізатором	39 x 23 мл

cat futur

Якісний каталізатор для таких С-силіконів як classic futur. Пофарбований у блакитний колір для вимірювання точної порції і контролю змішування. З новою структурою затверджувача, гіпоалергенний.



Арт.	Форма випуску	Од.
02382	Тюбик	23 мл










*доступні кольори:
жовтий, бежевий і білий




Силікони для вушних вкладишів

detax softwear®	19
earflex® 40 & 60 Shore	20
earflex® rainbow	20
bioplast 40 & 60 Shore	21
directmold	21
aquaplast® colormix	22
aquaplast®	22

Таблиця характеристик

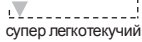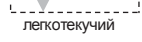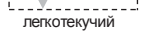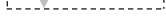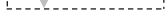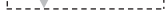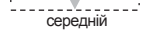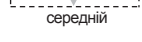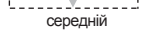	Консистенція	В'язкість/Текучість		Тиксотропія		Тривалість обробки	Тривалість затвердіння * Непрямий метод/ прямий метод	Метод	Кінцева твердість	Особливості	Супутні товари
		низька	висока	низька	висока						
detax softwear® 	 супер легкотекучий	 В'язкість Текучість				≈ 1:30 хв.	≈ 5 хв.	непрямий, цифровий	50 за Шором А	Заповнення форм, виготовлених цифровим методом	Пістолет-дозатор Automix2, змішувальні канюлі, softwear coat
earflex® 	 легкотекучий	 В'язкість Текучість				≈ 3:30 хв.	≈ 30 хв.	непрямий	40/60 за Шором А	Серійне виробництво, легке видавлювання з картриджа	Пістолет-дозатор, змішувальні канюлі, зажим, detax handy, bio coat, dip coat, super coat
earflex® rainbow 	 легкотекучий	 В'язкість Текучість				≈ 3:30 хв.	≈ 30 хв.	непрямий	40 за Шором А	10 кольорів, серійне виробництво, довговічні кольори	Пістолет-дозатор, змішувальні канюлі, зажим, detax handy, bio coat, dip coat, super coat
bioplast 	 середній	 В'язкість Текучість				≈ 1:30 хв.	≈ 20/5 хв.	непрямий, прямий	40/60 за Шором А	Багатоцільове використання, відмінна обробка	Пістолет-дозатор, змішувальні канюлі, Intra Tips, отоблоки, preclean, dip coat, super coat
directmold 	 середній	 В'язкість Текучість				≈ 1:30 хв.	≈ 5 хв.	прямий	60 за Шором А	Для безпосереднього виготовлення вкладишів, зменшений час затвердіння	Пістолет-дозатор, змішувальні канюлі, отоблоки, grip tool, detax handy, dip coat, super coat
aquaplus®/ colormix 	 середній	 В'язкість Текучість				≈ 1:00 хв.	≈ 15/5 хв.	непрямий, прямий	35 за Шором А	5 кольорів, плавучий, довговічні кольору	Пістолет-дозатор змішувальні канюлі, отоблоки, grip tool, detax handy, express coat, super coat

* непрямий метод: виготовлення в лабораторії при 23 °С/ прямий метод: безпосереднє виготовлення вкладишів при 35 °С (температура у вусі)

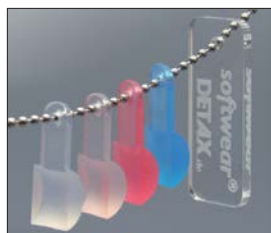

software coat
Антибактеріальне
покриття,
стр. 33

detax software®

Силікон нового покоління для непрямого виготовлення м'яких вушних вкладишів і протекторів заушних слухових апаратів. Легке заповнення негативних форм з пластику або гіпсу, виготовлених генеративним методом. Легко видавлюється з картриджа, не утворює повітряних бульбашок на структурах шарів, не потрібен красконагнітальний бак, не прилипає до негативної форми, легко виймається. Оптимізовані властивості «чудовою текучістю», відмінне витіснення повітря, мінімальний поверхневий натяг. Високе відтворення деталей, опір розриву і розтягуванню, висока еластичність відновлення. Комфорт при тривалому використанні завдяки м'якості і гнучкості, відсутності подразнення шкіри і біологічної сумісності. А-силікон, низька в'язкість, кінцева твердість: 50 за Шором А, колір: безбарвно-прозорий, прозоро-рожевий, прозоро-блакитний і прозоро-червоний.

Арт.	Форма випуску	Од.
03504	Набір картриджів з прозорою основою + каталізатор, Automix2	8 x 50 мл
03506	Набір картриджів з рожевою основою + каталізатор, Automix2	8 x 50 мл
03507	Набір картриджів з блакитною основою + каталізатор, Automix2	8 x 50 мл
03505	Набір картриджів з червоною основою + каталізатор, Automix2	8 x 50 мл
02706	Змішувальні канюлі, жовті	48 шт
02770	Змішувальні канюлі, рожеві	25 шт
02712	Насадки Intra Tips, жовті	96 шт
02771	насадки Intra Tips, білі	25 шт

earflex® 40 & 60 Shore

Силікон для виготовлення м'яких вушних вкладишів і протекторів заушних слухових апаратів. Міцність на розрив, постійна еластичність, легко видавлюється з картриджа і обробляється. Максимальний комфорт при використанні завдяки м'якості і гнучкості, тривалості стабільності форми і відсутності подразнення шкіри. А-силікон, легкотекучий, збільшений час обробки (3 хв. 30 сек.) для серійного виготовлення вкладишів в лабораторії. Кінцева твердість: 40/60 за Шором А, колір: безбарвно-прозорий, прозоророжевий.



Арт.	Форма випуску	Од.
03192	Набір картриджів 40, прозорий основа + каталізатор	8 x 50 мл
03216	Набір картриджів 40, рожевий основа + каталізатор	8 x 50 мл
03193	Набір картриджів 60, прозорий основа + каталізатор	8 x 50 мл
03217	Набір картриджів 60, рожевий основа + каталізатор	8 x 50 мл

earflex® rainbow

Продукт має такі ж характеристики як і earflex 40 & 60 shore. Призначений для виготовлення м'яких вкладишів і протекторів заушних слухових апаратів, довговічні кольори веселки. Кінцева твердість: 40 за Шором А, колір: бежевий, синій, жовтий, зелений, помаранчевий, червоний, чорний, білий.



Арт.	Форма випуску	Од.
02991	Стандартний набір 40 веселка основа + каталізатор Ассортимент: 1 x синій, 1 x червоний, 1 x помаранчевий, 1 x жовтий, 1 x зелений, 1 x чорний, 1 x білий, 1 x бежевий Змішувальні канюлі optima	8 x 50 мл 32 шт

bioplast 40 & 60 Shore

Силікон для виготовлення м'яких вушних вкладишів і протекторів завушних слухових апаратів, багатоцільове використання. Високий опір розриву, тривалий строк служби і легка обробка. Не викликає подразнення шкіри, біологічно сумісний. А-силікон середньої консистенції. Кінцева твердість: 40/60 за Шором А, колір: прозоро-рожевий, безбарвно-прозорий.



Арт.	Форма випуску	Од.
02081	Набір картриджів 40 рожевий основа + каталізатор	8 x 50 мл
02427	Набір картриджів 60 рожевий основа + каталізатор	8 x 50 мл
03084	Набір картриджів 60 прозорий основа + каталізатор	8 x 50 мл
03039	Одиночний набір 60 прозорий основа + каталізатор	1 x 50 мл

directmold

А-силікон з постійною еластичністю для виготовлення індивідуальних шумоізоляційних беруш і м'яких вушних вкладишів. Висока кінцева твердість, легка обробка, короткий період вулканізації, тривалий строк служби, не викликає подразнення шкіри, біологічно сумісний. А-силікон середньої консистенції. Кінцева твердість: 60 за Шором А, колір: прозоро-рожевий.



Арт.	Форма випуску	Од.
02687	Набір картриджів основа + каталізатор	8 x 50 мл
03187	Змішувальні канюлі optima білі	50 шт

Безпосереднє
виготовлення
індивідуальних слухових
протекторів

aquaplus® colormix

Спеціальний силікон в подвійних картриджах, для лабораторного або безпосереднього виготовлення різнобарвних гідроізоляційних беруш. М'яка початкова консистенція, легка обробка. Беруші, виготовлені з aquaplus® colormix зберігають постійну еластичність, опір розриву, не викликають подразнення шкіри і є біологічно сумісними. А-силікон середньої консистенції, кінцева твердість: 35 за Шором А, колір: синій, жовтий, зелений, помаранчевий, червоний.



Арт.	Форма випуску	Од.
03205	Стандартний набір colormix основа + каталізатор Ассортимент: 2 x синій, 2 x червоний, 2 x помаранчевий, 1 x жовтий, 1 x зелений, Змішувальні канюлі optima	8 x 50 мл 32 шт
02469	detax handy Пакетик	5 x синій 5 x червоний
03083	grip tool Пакетик	2 x синій 2 x червоний

aquaplus®

Спеціальний силікон в подвійних картриджах, для лабораторного виготовлення гідроізоляційних беруш. Також підходить для безпосереднього виготовлення. М'яка початкова консистенція, легка обробка. Беруші виготовлені з aquaplus® зберігають постійну еластичність, опір розриву, не викликають подразнення шкіри і є біологічно сумісними. А-силікон середньої консистенції, кінцева твердість: 35 за Шором А, колір: синій, червоний.



Арт.	Форма випуску	Од.
02423	Класичний набір картриджів основа + каталізатор Ассортимент: 4 x синій, 4 x червоний	8 x 50 мл
02469	detax handy Пакетик	5 x синій 5 x червоний
03083	grip tool Пакетик	2 x синій 2 x червоний
03188	Змішувальні канюлі optima білі	100 шт



Силіконові лаки

Abrucklack	25
microporlack	25
dip coat	26
express coat	26
bio coat®	26
frosty coat	27
super coat	27

Таблиця характеристик


		В'язкість/Текучість		Консистенція/ Характеристики	Тривалість висихання *	Особливості**	Рекомендовано для
		низька	висока				
frosty coat				Однокомпонентний лак, гарячої полімеризації, для занурення або нанесення пензликом	100 °C/212 °F 15 хв.	Матовий, вирівнюючий	A- і C-силіконів і вкладишів
dip coat				Однокомпонентний лак, для занурення	10 хв. при кімнатній температурі	Не створює плівку, сильне зчеплення	A- і C-силіконів, зліпків і вкладишів
express coat				Однокомпонентний лак, холодної полімеризації, для занурення або нанесення пензликом	8 хв. при кімнатній температурі	Швидкосохнучий, сильне зчеплення	A- і C-силіконів, зліпків і вкладишів
super coat				Однокомпонентний лак, гарячої і холодної полімеризації, для занурення або нанесення пензликом	За ніч, при кімнатній температурі/ 80 °C/176 °F 20 хв.	3 частинками срібла, довговічний, антибактеріальний	A- і C-силіконів, покриття поверхонь, силіконових вкладишів
bio coat®				Однокомпонентний лак, гарячої полімеризації, для занурення або нанесення пензликом	16 годин при кімнатній температурі/ 60 °C/140 °F 20 хв.	Не містить розчинника, без запаху, біосумісний	Тільки для A-силіконів і вкладишів (з A-силіконів)
Abdrucklack				Однокомпонентний лак, холодної полімеризації, для занурення або нанесення пензликом	20 хв. при кімнатній температурі/ 100 °C/212 °F 15 хв.	Вирівнюючий, високоглянсовий	A- і C-силіконів, зліпків
microporlack				Однокомпонентний лак, гарячої полімеризації, для занурення або нанесення пензликом	100 °C/212 °F 15 хв.	Згладжує, вирівнюючий	A- і C-силіконів, покриття поверхонь, силіконових вкладишів

*Тривалість висихання залежить від кімнатної температури, вологості і типу силікону.

**Міцна алюмінієва упаковка відповідно до стандарту EN 1B1 з оригінальною кришкою-ковпачком

Abdrucklack

Однокомпонентний лак для універсальної обробки будь-яких силіконових вушних зліпків (А- і С-силікони). Згладжує, вирівнює, створює покриття і захисний шар. Ідеальні властивості текучості, ефективне застосування в лабораторіях. Холодного затвердіння, глясовий ефект, прозорість.

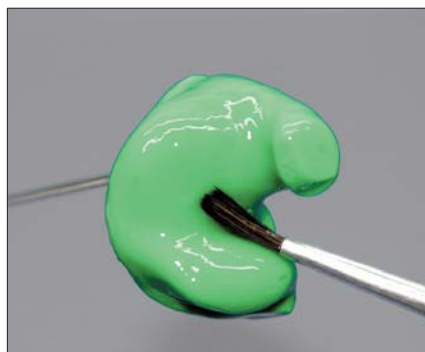

Арт.	Форма випуску	Од.
02589	Алюмінієва пляшка	30 мл
02493	Алюмінієва пляшка	250 мл
02165	Алюмінієва пляшка	1000 мл

Міцна алюмінієва упаковка
відповідно до стандарту 1B1
® з оригінальною
кришкою-ковпачком

microporlack

Однокомпонентний лак для згладжування і вирівнювання силіконових вкладишів і зліпків. Гарячого затвердіння (в печі з циркулюючим повітрям при 100°C/212°F протягом 15 хв.). Чудове зчеплення і постійна висока якість поверхні. Підходить для всіх типів силіконів, а також для однокомпонентних силіконів, що застигають при високих температурах.



Арт.	Форма випуску	Од.
02169	Алюмінієва пляшка	250 мл

dip coat

Спеціальний лак для нанесення покриття на силіконові вушні зліпки і вкладиші методом занурення, перешкоджає утворенню плівки при зануренні в рідину, ефективний при використанні в лабораторіях. Низька в'язкість, холодної полімеризації, глянсовий ефект, прозорий, надійне зчеплення.

Арт.	Форма випуску	Од.
03014	Алюмінієва пляшка	100 мл
03015	Алюмінієва пляшка	250 мл

express coat


Однокомпонентний лак, використовується для вкладишів і зліпків, висихає на повітрі, прозорий. Для згладжування і вирівнювання, ідеальні властивості текучості, діамантовий блиск, чудове зчеплення. Повністю висихає за 8 хв.

Арт.	Форма випуску	Од.
03012	Алюмінієва пляшка	100 мл

Міцна алюмінієва упаковка
відповідно до стандарту 1B1
® з оригінальною
кришкою-ковпачком

bio coat®

Однокомпонентний лак без розчинника, прозорий, для всіх А-силіконових вкладишів. Без запаху, без небезпечних для здоров'я випаровувань, не викликає подразнення шкіри і тканин, не містить подразнюючих речовин. Надійне зчеплення і постійна відмінна якість поверхні. Вулканізація при високих температурах > 60°C/140°F (приблизно 20 хв.) або на повітрі при кімнатній температурі (16 год.).

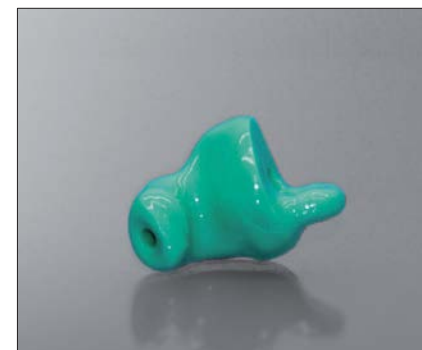


Арт.	Форма випуску	Од.
03017	Алюмінієва пляшка	100 мл



frosty coat

Матовий однокомпонентний лак, підходить також для силіконових вкладишів, прозорий, гарячого затвердіння. Для згладжування і вирівнювання, без блиску. Ідеальні властивості текучості, чудове зчеплення. Для створення ефекту інею на поверхні. Підходить для всіх силіконів, в тому числі для однокомпонентних силіконів гарячого затвердіння.

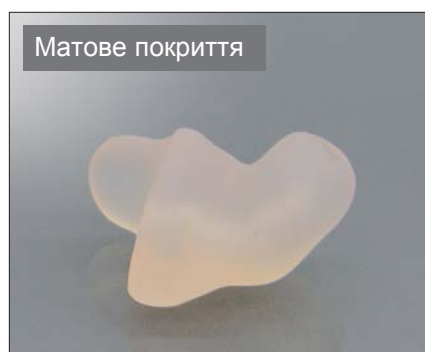

Арт.	Форма випуску	Од.
03284	Алюмінієва пляшка	100 мл



super coat

Антибактеріальний лак з частинками срібла для силіконових вкладишів і отопластики. Тривалий захист від бактерій, підходить для всіх видів силікону, висихає на повітрі, чудове зчеплення. При необхідності (при виникненні подряпин або потертостей) захисний шар можна нанести повторно в будь-який час.



Арт.	Форма випуску	Од.
02949	Алюмінієва пляшка	100 мл
02950	Алюмінієва пляшка	300 мл

Дублюючі силікони

durosil®	29
duglasil®	29
duglasil® express	29



durosil®

Дублюючий силікон для виготовлення негативних форм, тривала стійкість форми. Точне відтворення деталей, опір розриву, можливо ручне змішування, сумісний з поліметілметакрилатом. А-силікон, легкотекучий, колір: матова рожева основа, білий каталізатор 1:1, кінцева твердість: приблизно 17 за Шором А.



Арт.	Форма випуску	Од.
02145	Пляшка	2 x 1000 мл
02191	Каністра	2 x 5000 мл
02313	Кран для каністри	1 шт

duglasil® / duglasil® express

Кришталєво-прозорий силікон для відливання максимально прозорих негативних форм, особливо підходить для УФ-полімеризації, пропускає ультрафіолетові промені (УФА). Тривала стійкість форми, А-силікон, легкотекучий, колір: безбарвно-прозорий. Кінцева твердість **duglasil®**: приблизно 15 за Шором А, **duglasil® express** доступний в картриджах Automix, кінцева твердість: приблизно 7 за Шором А, швидко твердіє, приблизно 5 хв.



Арт.	Форма випуску	Од.
02613	Набір duglasil® express 3 картриджі Змішувальні канюлі, 6 мм	3 x 50 мл 6 шт
02150	duglasil® Пляшка	2 x 1000 мл
02167	duglasil® Каністра	2 x 5000 мл
02313	Кран для каністри	1 шт

Полімерний матеріал для вушних вкладишів

luxaprint® 3D shell	31
luxaprint® 3D mould	31
luxaprint® shellac	32
luxaprint® 3D cast	32
luxaprint® plaster hardener	33
softwear coat	33
acrylon® automix	34



luxaprint® 3D shell

Високоякісний полімерний матеріал, ультрафіолетового затвердіння, на основі (мет) акрилату, для виготовлення твердих вкладишів, основи заушних слухових апаратів, з використанням методу DLP (спектр світла 378-388 нм). Нижча в'язкість в порівнянні зі звичайними матеріалами (економія матеріалу, легка очистка, більш швидка кінцева обробка). Висока надійність процесу виготовлення вкладишів, а також опорних конструкцій, завдяки максимальній початковій твердості. Висока механічна міцність без крихкості. Висока продуктивність за рахунок короткого часу полімеризації. Біологічна сумісність, не містить бісфенолу А. Стандартні кольори: бежевий, прозора-рожевий, безбарвно-прозорий (інші кольори - на замовлення).



Арт.	Форма випуску	Од.
03513	Пляшка з захистом від УФ бежева	1000 г
03514	Пляшка з захистом від УФ безбарвно-прозора	1000 г
03598	Пляшка з захистом від УФ прозора-рожева	1000 г

Більш детальна інформація про матеріали надається за запитом

luxaprint® 3D mould

Високоякісний полімерний матеріал, ультрафіолетового затвердіння, на основі (мет) акрилату, для виготовлення твердих слухових протекторів, з використанням методу DLP (спектр світла 378-388 нм). Нижча в'язкість в порівнянні зі звичайними матеріалами (економія матеріалу, легка очистка, більш швидка кінцева обробка). Висока надійність процесу виготовлення вкладишів, а також опорних конструкцій, завдяки максимальній початковій твердості. Висока механічна міцність без крихкості. Висока продуктивність за рахунок короткого часу полімеризації. Біологічна сумісність, не містить бісфенолу А. Стандартні кольори: безбарвно-прозорий, прозора-рожевий, прозора-блакитний, прозора-червоний (інші кольори - на замовлення).



Арт.	Форма випуску	Од.
03608	Пляшка з захистом від УФ безбарвно-прозора	1000 г
03609	Пляшка з захистом від УФ прозора-рожева	1000 г
03610	Пляшка з захистом від УФ прозора-блакитна	1000 г
03611	Пляшка з захистом від УФ прозора-червона	1000 г

luxaprint® shellac

Однокомпонентний лак, ультрафіолетового затвердіння, для покриття поверхні твердих вушних вкладишів, виготовлених з (мет) акрилату, наприклад, з luxaprint® 3D shell / mould. Створює високоякісну гладку поверхню (захищає від подряпин, легко очищається), а також захищає від скупчення вушної сірки. Ідеальні властивості текучості, біологічна сумісність. Глянцевий ефект, безбарвно-прозорий, захист від пожовтіння "blue ray". Діамантовий блиск, не вимагає механічної поліровки.



Арт.	Форма випуску	Од.
03594	Алюмінієва пляшка	100 мл
03595	Алюмінієва пляшка	300 мл

luxaprint® 3D cast

Полімерний матеріал, ультрафіолетового затвердіння, для генеративного виготовлення форм для відливання м'яких вушних вкладишів з силікону з використанням методу DLP. Прозоро-зелений матеріал дозволяє візуально перевіряти процес заповнення рідким силіконом, твердіє при кімнатній температурі. Особливі характеристики матеріалу: дуже низька в'язкість для економії матеріалу і полегшення чищення форм. Форми, виготовлені з luxaprint® 3D cast, легко кришаться і дозволяють швидко витягти силіконовий зліпок. Колір: прозоро-зелений.




Арт.	Форма випуску	Од.
03520	Пляшка з захистом від УФ	1000 г

Спектр УФ світла
(378-388 нм)

luxaprint® plaster hardener

Надтонкий спрей для зміцнення та ізоляції цифрових гіпсових форм для виготовлення м'якої отопластики і вушних вкладишів з силікону в лабораторії. Збільшує рівень міцності, згладжує поверхню, знижує тертя і полегшує виймання з форми. Покращує якість поверхні вушних вкладишів!

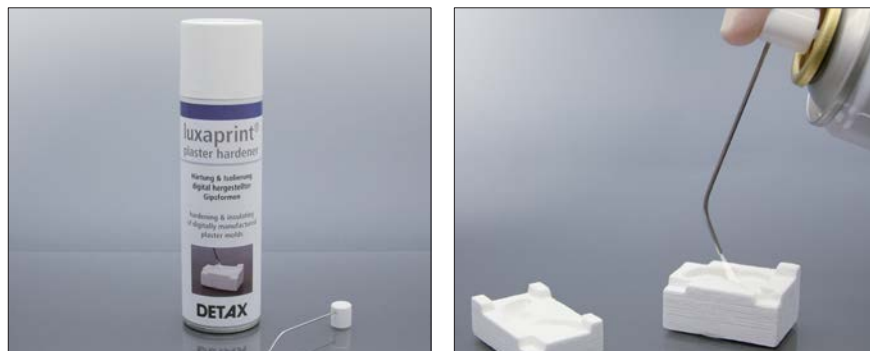

Арт.	Форма випуску	Од.
03512	Аерозольний балончик з канюлею	250 мл

softwear coat

Антибактеріальний прозорий лак для згладжування і вирівнювання поверхні отопластики з силікону (наприклад структури шарів, створені при цифровому виготовленні, нерівність поверхні і т.д.). Ідеальні властивості текучості, діамантовий блиск, гарне зчеплення, чудова якість поверхні, висихання на повітрі. Для тривалого захисту від бактерій.



Арт.	Форма випуску	Од.
03509	Алюмінієва пляшка	500 мл

detax softwear®
силікон для 3D
лиття стр. 19

acrylon® automix

Силікон на основі уретанметакрилату в картриджах 10:1, для виготовлення твердих акрилових вушних вкладишів в лабораторії. Холодної полімеризації, твердіє без впливу енергії (тепла, світла). Легкотекучий, швидко твердіє, не містить метилметакрилату (без запаху, без випаровувань мономерів). Пропонується для системи Automix 2, 10:1. Колір: безбарвно-прозорий, прозоро-рожевий.



Арт.	Форма випуску	Од.
02764	Набір картриджів прозорий Змішувальні канюлі, блакитні	2 x 55 г 10 шт
02765	Набір картриджів рожевий Змішувальні канюлі, блакитні	2 x 55 г 10 шт
02767	Пістолет-дозатор 10:1	1 шт
02768	Змішувальні канюлі, блакитні 10:1	25 шт



Прозорий
дублюючий силікон
стр. 29



Гігієнічна продукція

smartclean® tabs	36
smartclean® foam	36
smartcare®	37
smarthylocare®	37
smartclean® pen	38
smartclean® wipe	38
smartbox „clean & dry“	38

Таблетки smartclean® tabs

Шипучі таблетки з активним киснем для гігієнічної, глибокої чистки вушних вкладишів. Спеціальна комбінація активних речовин розчиняє вушну сірку та інші відкладення. Візуальний контроль чистки завдяки інтегрованому кольоровому індикатору. Експрес-чистка всього за 30 хвилин (фіолетова фаза), лимонний запах.



Арт.	Форма випуску	Од.
02881	Футляр з таблетками	10 шт
02637	Футляр з таблетками	20 шт

Піна smartclean® foam

Гігієнічна піна для швидкої та інтенсивної чистки вкладишів заушних слухових апаратів. Спеціальна комбінація активних речовин гарантує видалення забруднень без всяких зусиль. Запобігає подразненню і запаленню, викликаними мікробами. Гігієнічна, час дії всього 5 хвилин. Легка у використанні, точне дозування, без розчинників і пропелентів.



Арт.	Форма випуску	Од.
02636	Пляшка (вистачає приблизно на 60 чисток)	50 мл

smartclean® піна
без розчинника,
швидко і гігієнічно

Гель smartcare®


Прозорий комфортний гель, розроблений спеціально для вушних вкладишів. Для більш комфортного носіння, полегшує введення і виймання вкладиша. Усуває відчуття стороннього тіла у вусі і покращує ущільнення. Прозорий гель створює тонку плівку, яка не всмоктується шкірою. Не викликає подразнення, містить екстракт Алое віра.



Арт.	Форма випуску	Од.
02618	Тюбик	7 мл

Крем smarthylcare®

Не викликає подразнення, полегшує введення і виймання вушного вкладиша. Усуває відчуття стороннього тіла у вусі, підвищує комфортність носіння. Створює тонку плівку, покращує ущільнення. Також підходить для профілактики подразнення шкіри, пов'язаного з носінням вушних вкладишів або окулярів. Містить 0,1% низькомолекулярного гіалуронату натрію, отриманого біотехнологічним шляхом. Корисні властивості гіалуронової кислоти сприяють регенерації шкіри.

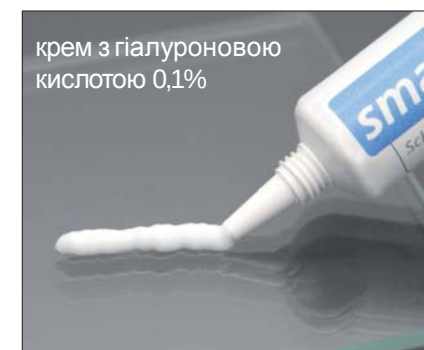

Арт.	Форма випуску	Од.
03572	Тюбик	7 мл

Містить 0,1%
низькомолекулярного
гіалуронату натрію,
сприяє регенерації
шкіри

Ручка/салфетки smartclean® pen / wipe

Ручка: ручка для чищення слухових апаратів. Застосування без утворення крапель і проникнення вологи. Містить багатофункціональні наконечники: широкий - використовується для очищення великих поверхонь, вузький - дозволяє очистити важкодоступні і дрібні частини. Швидка і ефективна, зручно брати з собою в дорогу, лимонний запах.

Вологі серветки: вологі гігієнічні серветки для слухових апаратів і вкладишів. Для ефективної чистки в будь-який час. Зручний диспенсер з 35 серветками для гігієнічного вилучення.



Арт.	Форма випуску	Од.
02678	Ручка	1 шт
02735	Коробка-диспенсер	35 шт

Контейнер smartbox „clean & dry“

Контейнер для чищення та сушки з роздільними секціями та кришкою.

Чищення: відділення для вологого чищення, зі зручним горлечком. Не вимагає зміни фільтра і контакту з миючим засобом.

Сушка: сушильне відділення з функціональними потовщеннями для кращої циркуляції повітря і прискореної сушки. Більш тривалий строк служби сушильної капсули завдяки щільній фіксації подвійної дії.



Арт.	Форма випуску	Од.
02638	Контейнер для чистки і сушки	1 шт
02737	Сушильні капсули з кольоровим індикатором	4 шт
02736	Груша для продування звуковода, біла	1 шт
02738	Пензлик Smartbrush	5 шт
02883	Пензлик, білий	1 шт




Супутні товари

optima	40
vario mix	40
Automix1	41
Automix2	41
Automix mini	41
easy	42
easy2	42
Отоблоки secure	43
Отоблоки vent	43
Ложки	44
otopen	44
Блок для змішування/Шпатель	45
preclean	45
detax handy	46
grip tool	46
Raptor X	47
Шліфувальні прилади	47

Змішувальні канюлі optima

Поліпропіленова канюля для змішування, одноразова, для стандартних картриджів, оптимізована геометрія, для вражаючого результату. Укріплений стрижень, ніякого витіснення і спотворення, навіть при використанні матеріалів з підвищеною в'язкістю. Для отримання 100% однорідної маси. Діаметр: 6 мм, сумісність з усіма картриджами системи Automix1. кольори: бузковий, білий.

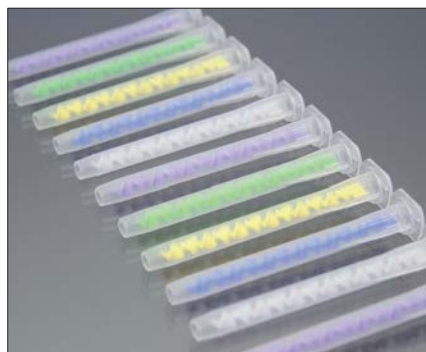

Арт.	Форма випуску	Од.
03159	Змішувальні канюлі optima бузкові	50 шт
03160	Змішувальні канюлі optima бузкові	100 шт
03187	Змішувальні канюлі optima білі	50 шт
03188	Змішувальні канюлі optima білі	100 шт

Пістолет-дозатор vario mix

Універсальний пістолет-дозатор, розрахований на стандартні картриджі Automix1 і Automix2 (S50). Один пістолет-дозатор для всіх пропорцій змішування (1:1, 2:1, 4:1, 10:1)! Легкий у використанні, вставки і поршні можна замінити і почистити при необхідності. Включає в себе: 3 вставки, 4 поршня, схему застосування.



Арт.	Форма випуску	Од.
03209	Універсальний пістолет-дозатор 1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Набір

Automix2

Арт.	Форма випуску	Од.
02699	Пістолет-дозатор для стандартних картридів 1:1	1 шт
02770	Змішувальні канюлі, рожеві	25 шт
02969	Змішувальні канюлі, рожеві	100 шт
02706	Змішувальні канюлі, жовті	48 шт
02774	Змішувальні канюлі, зелені	25 шт
03614	T-Mixer, рожевий	25 шт
03615	T-Mixer, жовтий	25 шт
03616	T-Mixer, зелений	25 шт
02771	Насадки Intra-Tips, білі	25 шт
02712	Насадки Intra-Tips, жовті	96 шт
03617	Пістолет-дозатор для стандартних картриджів "Т"	1 шт
02767	Пістолет-дозатор для стандартних картриджів 10:1	1 шт
02768	Змішувальні канюлі, сині 10:1	25 шт

Automix1

Арт.	Форма випуску	Од.
02083	Пістолет-дозатор для стандартних картриджів 1:1	1 шт
02123	Змішувальні канюлі, 6 мм	50 шт
02393	Змішувальні канюлі, 6 мм	100 шт
02047	Змішувальні канюлі, 9 мм	50 шт
02186	Змішувальні канюлі, 9 мм	100 шт
02513	Змішувальні канюлі quadro	25 шт
02345	Насадки Intra-Tips	96 шт



Automix1, Стандарт



Automix2, Стандарт



Automix2, 10:1



Automix2, T



Automix mini, 1:1



Automix mini

Арт.	Форма випуску	Од.
03447	Пістолет-дозатор mini для картриджів minimix 10 мл, 1:1	1 шт
03446	Змішувальні канюлі minimix, зелені 1:1	25 шт
03448	Гнучка трубка для канюлей minimix	20 см

Зліпочний шприц easy

Стандартний подвійний поршневий зліпочний шприц для рівномірного введення силіконових зліпочних матеріалів у вухо, багатофункціональний, отвір 3,5 мм, зовнішній діаметр 6 мм. Рівномірне видавлювання матеріалу без зусиль. Запасний циліндр можна замовити окремо. Кольори: синій, жовтий, зелений, червоний, бірюзовий, білий.



Діаметр кінчика 3.5 мм

Арт.	Форма випуску	Од.
02140	Зліпочний шприц синій	1 шт
02198	Зліпочний шприц білий	1 шт
02792	Зліпочний шприц жовтий	1 шт
02793	Зліпочний шприц зелений	1 шт
02996	Зліпочний шприц червоний	1 шт
03037	Зліпочний шприц бірюзовий	1 шт
02492	Запасний циліндр прозорий	1 шт

Зліпочний шприц easy2

Подвійний поршневий зліпочний шприц с подовженим кінчиком - зменшений отвір (2,5 мм) для зняття зліпків, призначених для виготовлення внутрішньоканальних слухових апаратів (CIC), а також для вузьких і дитячих слухових каналів. Зовнішній діаметр 4,5 мм! Рівномірне видавлювання матеріалу без зусиль. Запасний циліндр можна замовити окремо. Кольори: бузковий, сірий, рожевий.




Діаметр кінчика 2.5 мм

Арт.	Форма випуску	Од.
03190	Зліпочний шприц довгий, бузковий	1 шт
03191	Зліпочний шприц довгий, сірий	1 шт
03503	Зліпочний шприц довгий, рожевий	1 шт
03189	easy2 Запасний циліндр довгий, прозорий	1 шт

Отоблоки secure



Отоблоки, виготовлені з м'якого поролону з ниткою-запобіжником. Новий контрастний колір: сині подушечки з поліпшеною видимістю для візуального контролю надійної установки і оптимального ущільнення слухового каналу. Кольори: синій, конічна форма: діаметр приблизно 11 мм, довжина 13 мм.

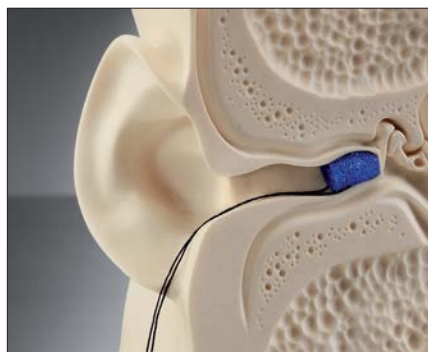

Арт.	Форма випуску	Од.
03321	Отоблоки, конічні	100 шт

Отоблоки vent

Вентильовані отоблоки для захисту барабанної перетинки при знятті зліпків, з м'якого поролону з вентиляційною трубкою. Особливо підходять для зняття глибоких вушних зліпків і для дитячих вушних каналів. Трубка гарантує усунення тиску під час застосування для зручного і надійного виготовлення зліпка. Колір: зелений. Діаметр: приблизно 7 мм.

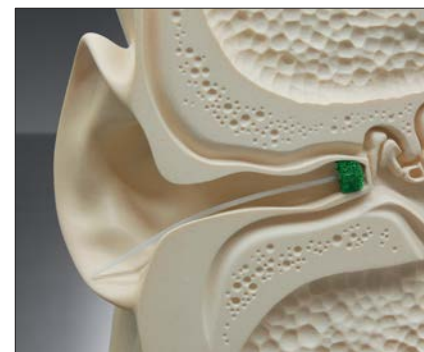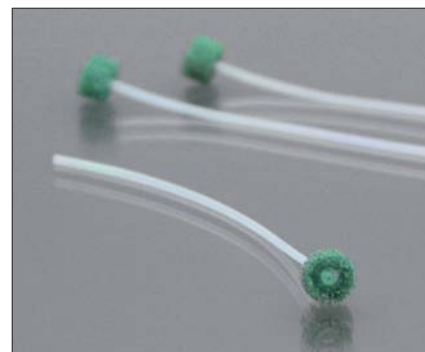

Арт.	Форма випуску	Од.
03449	Вентильовані отоблоки	24 шт

Олівець otopen

Спеціальний олівець для легкого нанесення написів на силікон і силіконові поверхні (наприклад, на вушних вкладишах), що не стираються.

Чаша для змішування, зроблена з пластмаси, з мірною шкалою, у двох варіантах розміру.

Пензлик з синтетичного волокна для лакування.



Арт.	Форма випуску	Од.
02739	Спеціальний олівець, синій	1 шт
02112	Чаша, конічна, велика (75 мл)	1 шт
02498	Чаша, конічна, мала (23 мл)	1 шт
02499	Пензлик	1 шт

Мірні ложки Dosierlöffel

Мірні ложки для ефективного и точного дозування зліпного силікону. Довговічний пластик. Важко сплутати між собою, завдяки різним кольорам, доступно 10 кольорів. Ідеальний об'єм ложки: С-Силікон 10 мл., А-Силікон 2 x 5 мл.



для А-силіконів

Арт.	Форма випуску	Од.
02942, 02943	фіолетовий, світло-рожевий	Набір
02142, 02144	синій, білий	Набір
02188, 02144	світло-жовтий, білий	Набір
02887, 02888	зелений, жовтий	Набір
03519, 02144	рожевий, білий	Набір

для С-силіконів

Арт.	Форма випуску	Од.
02097	білий	1 шт
02555	бежевий	1 шт
02189	жовтий	1 шт

Блок для змішування/Шпатель Anmischblock/Spatel

Блок для змішування з пергаміну (Р) або з пластмасовим покриттям (К), складається з 30 аркушів, зі шкалою, пропонується у двох варіантах розміру, листи відриваються окремо.

Шпатель для змішування, нержавіюча сталь, дерев'яна ручка, для змішування зліпного силікону.

Шпатель для змішування пластмасовий, для змішування зліпного силікону. Кольори: синій, білий.



Арт.	Форма випуску	Од.
02031	Блок для змішування (Р) великий	21,0 x 14,8 см
02032	Блок для змішування (Р) малий	14,5 x 9,5 см
02033	Блок для змішування (К) великий	21,0 x 14,8 см
02034	Блок для змішування (К) малий	14,5 x 9,5 см
02036	Шпатель для змішування, нержавіюча сталь	1 шт
02037	Шпатель для змішування, синій	1 шт
02830	Шпатель для змішування, білий	1 шт

Ізоляційний засіб preclean

Надтонкий ізоляційний засіб, гарантує легке виймання вушних зліпків, а також при безпосередньому виготовленні шумо- і гідроізоляційних беруш і отопластики холодного затвердіння, запобігає утворенню шару, що змазується (інгібованого шару).



Арт.	Форма випуску	Од.
02677	Пляшка з пензликом	15 мл

Ручка і шнур detax handy

Ручка з кольорового пластику, укріпленого вуглецем, для вгвинчування в силіконові шумо- і гідроізоляційні беруші, зі зручним вушком для приєднання трубки або шнура. Шнур detax handy: зручний пластиковий шнур, з трубкою для фіксації кінця шнура.




Арт.	Форма випуску	Од.
02469	detax handy Пакетик	5 x синій 5 x червоний
02682	detax handy шнур, жовтий трубки, чорні	3 м 10 шт

Формочка для рукоятки grip tool

Практична формочка для виготовлення рукоятки для силіконової отопластики (наприклад, для шумо- і гідроізоляційних беруш). Пряме занурення в незастиглий силікон під час виготовлення вушного вкладиша. Виготовлена з довговічного прозорого пластику, використовується для візуального контролю наповнення силіконом, багаторазового використання.




Арт.	Форма випуску	Од.
03083	grip tool Пакетик	2 x синій 2 x червоний

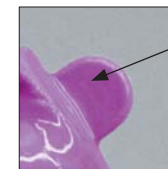

чудова форма рукоятки, не потребує багато місця
- гарантує максимальний комфорт і надійність ручки
завдяки антиковзаючій поверхні

Бор Raptor X

Надміцний твердосплавний бор, спеціально призначений для роботи з силіконом, для швидкої і ефективної обробки в лабораторії. Для зняття матеріалу без розмазування, довговічний. Доступний в різних формах, поштучно. Діаметр стрижня 2,35 мм, максимальна швидкість: 23 000 об./хв.

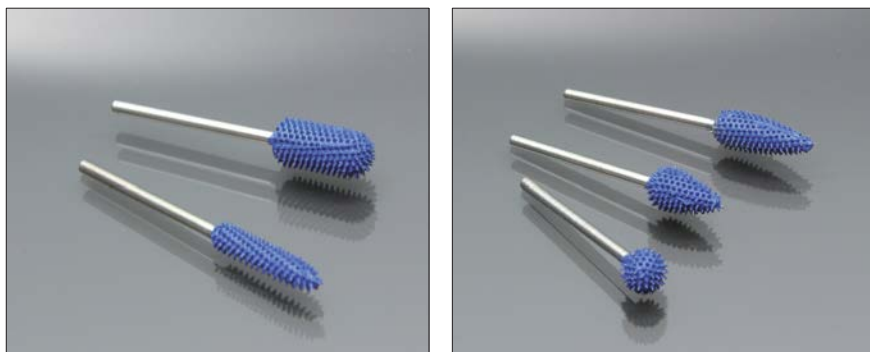

Арт.	Форма випуску	Од.
03309	Циліндр, круглий (Ø 8 мм, довжина 13 мм)	1 шт
03310	Циліндр, малий, круглий (Ø 5 мм, довжина 19 мм)	1 шт
03313	Загострений, довгий (Ø 8 мм, довжина 19 мм)	1 шт
03311	Загострений, малий (Ø 8 мм, довжина 13 мм)	1 шт
03312	Шар (Ø 8 мм, довжина 8 мм)	1 шт

Шлифовальные приборы/Schleifhilfen

Спеціальний шліфувальний прилад для детальної обробки, підходить для всіх типів силікону (вирівнювання і усунення нерівностей). Доступний у двох розмірах:

Великий: діаметр 7 мм, зернистість 150, швидкість 20 000 об./хв.

Маленький: діаметр 5 мм, зернистість 150, швидкість 20 000 об./хв.



Арт.	Форма випуску	Од.
02551	Шліфувальна насадка велика, кругла	10 шт
02565	Тримач шліфувальної насадки, великий, круглий	1 шт
02615	Шліфувальна насадка велика, загострена	10 шт
02616	Тримач шліфувальної насадки, великий, загострений	1 шт
03006	Шліфувальна насадка мала, кругла	10 шт
02997	Тримач шліфувальної насадки, малий, круглий	1 шт
03011	Шліфувальна насадка мала, загострена	10 шт
02998	Тримач шліфувальної насадки, малий, загострений	1 шт

Алфавітний покажчик

A

Abrucklack.....	25
acrylon® automix	34
addition mini Junior	12
addition protect XPress.....	11
addition spectra.....	11
addition supra®	10
addition ultra®	10
Anmischblock/Spatel.....	45
aquaplust®	22
aquaplust® colormix.....	22
Automix1.....	41
Automix2.....	41
Automix mini	41

B

bio coat®	26
bioplast 40 & 60	21

C

cat futur	16
classic futur	16

D

detax addition.....	14
detax flextime®	15
detax handy	46
detax softwear®	19
dip coat.....	26

directmold.....	21
Dosierlöffel.....	44
duglasil®	29
duglasil® express.....	29
durosil®	29

E

earflex® 40 & 60	20
earflex® rainbow	20
easy.....	42
easy2.....	42
express coat.....	26

F

frosty coat.....	27
------------------	----

G

green eco.....	15
grip tool	46

L

luxaprint® 3D cast.....	32
luxaprint® 3D mould.....	31
luxaprint® 3D shell.....	31
luxaprint® plaster hardener.....	33
luxaprint® shellac.....	32

M

microporlack	25
--------------------	----

O

optima	40
Отблки secure.....	43
Отблки vent.....	43
otopen	44

P

pink putty.....	14
preclean.....	45

R

Raptor X.....	47
---------------	----


S

Schleifhilfen	47
smartbox „clean & dry“	38
smartcare®	37
smartclean® foam	36
smartclean® tabs.....	36
smartclean® pen	38
smartclean® wipe.....	38
smarthylocare®	37
softwear coat.....	33
super coat	27

V

vario mix.....	40
----------------	----

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100% made in Germany **one step** bonding super**hydrophilic** IMPRESSION materials
VPS **silicones** **CHEMIE** AUS LEIDENSCHAFT platinum catalyst **medical** **SILICONES**
putty **PREMIUM** **quality** colours 90 Shore A highend **QUALITY** made by **DETAX**.de
smartproducts® antimicrobial **DETAX**.de **smart**clean® antibacterial surface sealing
light curing **acrylic** thixotropic **SILICONES** ultra® **detail** reproduction **COMPOSITE**



DETAX

100% ВИРОБЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ



DETAX GmbH & Co. KG • вул. Карла Цейсса, 4 • 76275 Еттлінген/Німеччина • Тел.: +49 7243 / 510-0 • Факс: +49 7243 / 510-100 •
service@detax.de • www.detax.de